


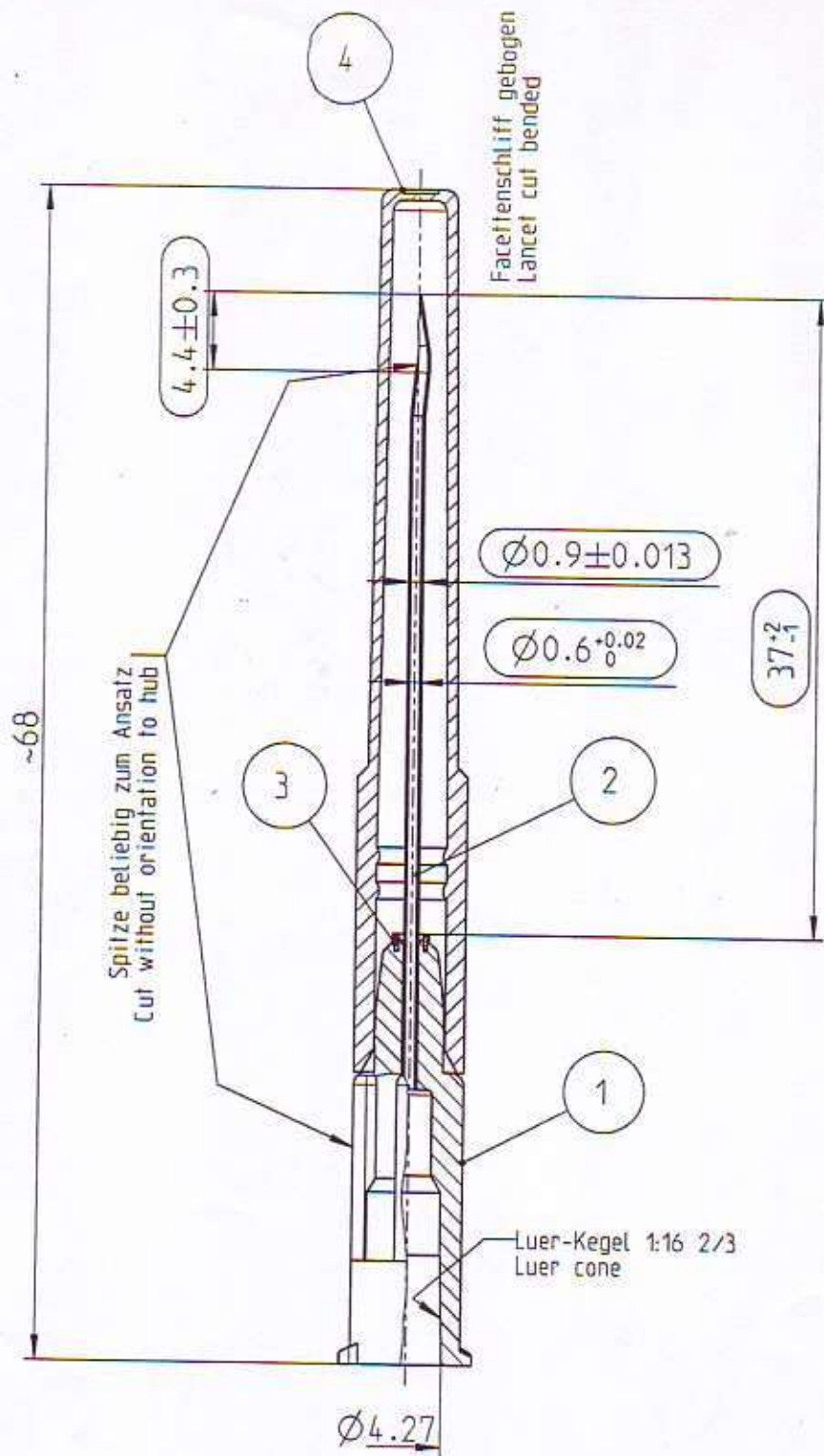

Art.Nr.	Teilnr.	Art.Nr.	Benennung	Protection cap	42-06_P058	PP-HD 810 MO	natur	nature
			Verklebung	Bonding	SO-3-1-1A	Araldite	transparent	transparent
			Kante Ø0.9 Fac.	Canula Ø0.9 lacer cut	GO-090-83_P053	1.4301		
			Rundnippel mit Luer-Lock	Hub with Luer-Lock	41-03-27-2_P052	PC-Makrolon 2858	gelb transp.	yellow transp.
				Titel	Zchnng.Nr._Pos.	Werkstoff	Farbe	Color
					Drw.No._Pos.	Material		

EINZELTEILE / PARTS

This drawing contains information which is the exclusive property of SFM. Any use or disclosure of this information without the expressed written consent of SFM is prohibited.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Änderungen nur durch SFM-CAD zulässig.

gez.	18.03.02	Wl.	DIN 7168:	mittel
gepr.	18.03.02		DIN 16901:	150
Datum		Name	Freimaßtoleranzen / Tolerances	

Maßstab	5:2
Scale	
Prüfmaß	Prüfmaß
Dim. to be checked	Dim. to be checked

Benennung / Title

Portkanüle Ø0.9/20G x 37

Port needle Ø0.9/20G x 37

f m
medical devices®

Zeichnungs-Nr. / Drawingno.

P7-1-14

d	111-09	02.09.09	He
Index	Änderung / Revision	Dat.	Name

Ersatz für/Repl. for: P7-1 Pos.4 vom 14.01.92 Indikat / Sheet 1 von 1