


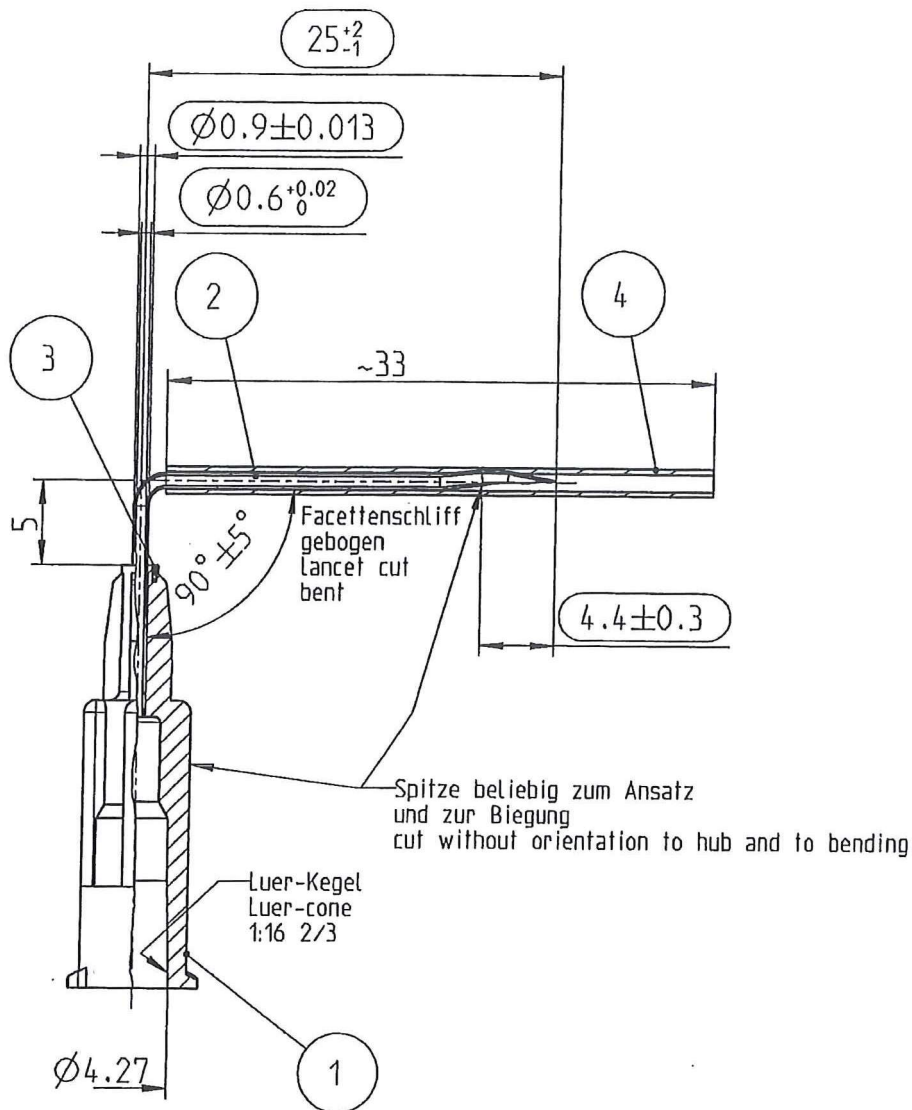

4	3	2	1	Teilnr.	Art.Nr.	Benennung	Tube	02-106_POS1	NSC 20	natur	nature
						Schlauch Ø1.0xØ1.6	Bonding	SO-3-1-1A	Araldite	transparent	transparent
						Verklebung	Cannula Ø0.9	60-090-8306-4_POS4	1.4301	transparent	transparent
						Kanüle Ø0.9 Fac.	Hub with Luer-Lock	41-03-27-2_POS2	PC-Makrolon 2858	gelb transp.	yellow transp.
						Rundnippel mit Luer-Lock	Titel	Zchn.-Nr. Pos.	Werkstoff	Farbe	Color
								Drw.No. Pos.	Material		
EINZELTEILE/ PARTS											
KOMPLETT/ COMPLETE											

This drawing contains information which is the exclusive property of SFH. Any use or disclosure of this information without the expressed written consent of SFH is prohibited.

gez. 22.11.02 WI. DIN 7168: mittel Maßstab 5:2
 gepr. 22.11.02 DIN 16901: 150
 Datum Name Freimaßtoleranzen / Tolerances

Maßstab 5:2
 Scale
☐ = Prüfbemaßung
 Dim. to be checked

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Änderungen nur durch SFH-CAD zulässig.

Benennung / Title
 Portkanüle Ø0,9/206 x 25 gebogen
 Port needle Ø0,9/206 x 25 curved



Zeichnungs-Nr. / Drawingno.

P7-1-17

d 106-09 20.08.09 He
 Index Änderung / Revision Dat. Name

Ersatz für/Repl. for: P7-1-1 Pos.3 vom 05.02.92 Blatt / Sheet 1 von 1